



À quels résultats puis-je m'attendre ?

- Disparition des vaisseaux inesthétiques apparents
- Résultats visibles dès la 1^{ère} séance*

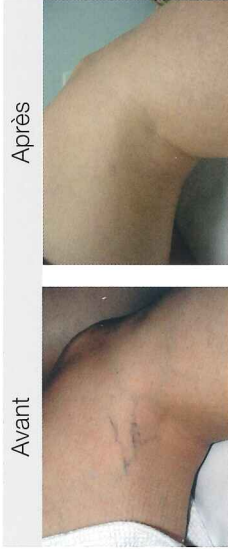

Varicosités des membres inférieurs

Avec l'aimable autorisation du docteur Marguerite Germain.

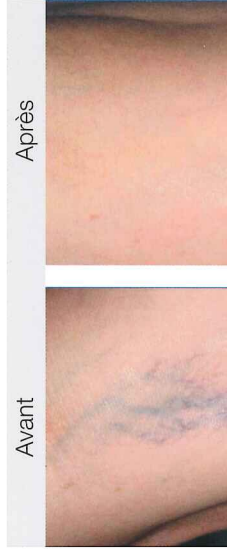

Varicosités des membres inférieurs

Avec l'aimable autorisation du docteur Ross.



Télangiectasies

Avec l'aimable autorisation du docteur Stephen W. Eubanks.

*Les résultats peuvent varier en fonction des individus

La gamme Gentle Pro™

La gamme Gentle Pro™

Obtenez une peau nette

Traitement des lésions vasculaires du visage et des membres inférieurs.

Prenez rendez-vous avec votre spécialiste dès aujourd'hui !



www.syneron-candela.com



Sans vaisseaux apparents,
ni varicosités



©2018 Tous droits réservés. Ce document marketing peut inclure des marques déposées, des noms commerciaux et des marques enregistrées dans certaines juridictions du groupe de sociétés Syneron Candela. PB93172FR

Débarrassez-vous de vos vaisseaux disgracieux grâce à la gamme de lasers GentlePro™

Les lésions vasculaires peuvent être présentes dès la naissance ou se développer avec l'âge, à travers certaines pathologies veineuses.

De petits vaisseaux apparaissent sur les membres inférieurs ou sur le visage.

Quels types de lésions vasculaires peut-on traiter ?


Le laser vasculaire Nd:YAG dont la longueur d'onde est 1064nm, permet de traiter les lésions vasculaires superficielles inesthétiques du visage et des membres inférieurs :

- Varicosités
- Erythrose
- Télangiectasies
- Lac veineux




Comment se déroule une séance ?


Lors de la 1^{ère} séance, votre praticien procédera au paramétrage du laser en fonction des caractéristiques de votre peau et des zones à traiter, puis vous équipera d'une protection oculaire. Il réalisera ensuite, préalablement au traitement, un test pour évaluer votre réaction cutanée. Le traitement dure en général de 15 à 30 minutes.

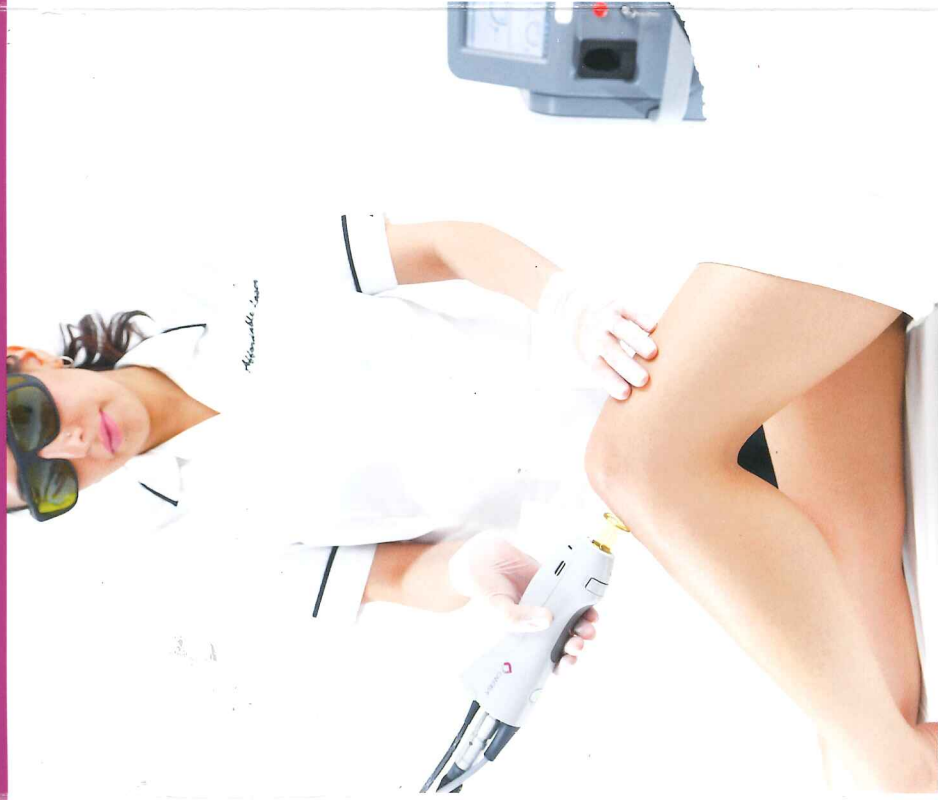

Une peau plus nette après traitement avec la gamme GentlePro™

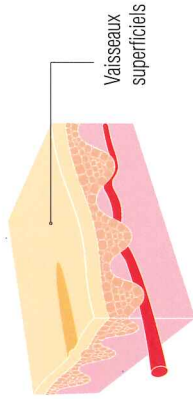

Vaisseaux superficiels

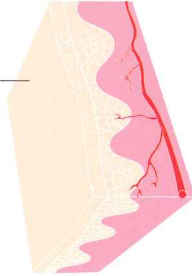

Le jour de la séance, votre peau doit être propre, sèche, sans maquillage, ni crème. La peau doit être protégée du soleil avant et après le traitement. Il est également recommandé de ne pas agresser la peau (exfoliants...) et de l'hydrater quelques jours avant le traitement.

Combien de séances sont nécessaires ?

Il faut compter en moyenne 2 séances pour traiter efficacement les lésions vasculaires. Il est parfois nécessaire de prévoir quelques séances supplémentaires pour les lésions vasculaires étendues ou résistantes.

Le traitement est-il définitif ?

Les lésions vasculaires sont liées à une fragilité capillaire, le plus souvent d'origine génétique, et évoluent avec l'âge et l'hygiène de vie. L'efficacité des traitements vasculaires est donc soumise à ces évolutions.

Le traitement est-il douloureux ?

La notion de douleur étant propre à chacun, il est difficile de mesurer la sensation ressentie individuellement. La plupart des patients disent ressentir un léger inconfort, qui ne dure que le temps du tir laser et disparaît quasi instantanément. Les lasers de la gamme GentlePro sont équipés d'un système de froid cryogénique (DCD®) qui refroidit l'épiderme avant chaque impulsion laser et permet ainsi d'apporter davantage de confort lors de la séance.

Le traitement est-il sûr ?

Le traitement par laser est une méthode efficace et éprouvée. Le laser est un appareil médical dont le réglage précis, en fonction de la peau de chaque patient, est le garant d'un traitement sûr. Le respect des paramètres et des précautions est essentiel afin de garantir la sécurité du patient lors du traitement.